



Safyre
Adjustable Sling System

SISTEMA AJUSTABLE PARA
EL TRATAMIENTO DE LA IUE FEMENINA

Promedon
— People + Innovation



AJUSTABILIDAD

Safyre Adjustable Sling System posee, como característica única, una ajustabilidad intraoperatoria y postoperatoria (si es necesaria). La tensión se puede ajustar según las necesidades de cada paciente.

VERSATILIDAD

Safyre Adjustable Sling System ofrece, en sus tres versiones, un kit quirúrgico completo y simple de usar que facilita procedimientos seguros, reproducibles y mínimamente invasivos, ya sea para un enfoque retropúbico o transobturador.

ÉXITO CLÍNICO COMPROBADO

Safyre Adjustable Sling System se ha probado en miles de pacientes en todo el mundo y ha demostrado una "tasa de éxito clínico del 95%".¹ Safyre Adjustable Sling System permite al cirujano optimizar los resultados obtenidos con los slings suburetrales de polipropileno convencionales, debido a su característica única de ajustabilidad postoperatoria.

"...103 mujeres (59%) del grupo con slings suburetrales de polipropileno informaron la cura de la incontinencia urinaria de esfuerzo..." (British Medical Journal, July 2002 - "Prospective multicentre randomised trial of tension-free vaginal tape and colposuspension as primary treatment for stress incontinence" – Ward, Karen; Hilton, Paul on behalf of the United Kingdom and Ireland Tension-free Vaginal Tape Trial Group.)

"...Continúa el interrogante de qué se debe hacer con las pacientes que siguen padeciendo incontinencia después de la cirugía de colocación del sling suburetral de polipropileno..." (European Urology Supplements I (2002), 38-40 – "Stress Incontinence: New developments in the Post-TVT World" - Bart Bemelmans, Unit for Functional Urology, Universal Medical Center, Nijmegen, The Netherlands).

Se ha implantado con éxito en más de 100.000 pacientes.²

CONFIABILIDAD

La porosidad y densidad óptimas, junto con la baja elasticidad, hacen que la malla suburetral de Safyre sea un material muy confiable que ofrece las mejores condiciones para el crecimiento tisular y minimiza el riesgo de erosión e infección. Una malla confiable y los brazos de fijación de elastómero de polidimetilsiloxano convierten a Safyre Adjustable Sling único en diseño y funcionalidad.

1. Paulo C.R. Palma, MiriamDambros, Cássio Z. Ricetto, Marcelo Thiel and Nelson Netto Jr. "The Ibero-American experience with a re-adjustable minimally-invasive sling". British Journal of Urology 2005: 95, 341-345.

2. Data on File. Promedon.

PARA EL ABORDAJE TRANSOBTURATORIO

Safyre T Plus Adjustable Sling System es el último paso en la evolución de los slings transobturatorios, ya que combina la seguridad del abordaje transobturatorio con una ajustabilidad optimizada.




Ajustabilidad óptima

- El sistema de avanzada permite ajustar la tensión de acuerdo a las necesidades de la paciente. El kit quirúrgico incluye arandelas que ayudan a mantener la tensión deseada durante la cirugía y, de ser necesario, realizar ajustes postoperatorios.



Evolucionado Sistema de tunelización

- El sistema de tunelización ergonómicamente desarrollado, utiliza agujas con un exclusivo diseño semicircular que simplifica el movimiento quirúrgico. El diámetro diferencial (de 3,25 y 4 mm) permite mínima invasividad y un fácil manejo de las agujas durante la implantación.

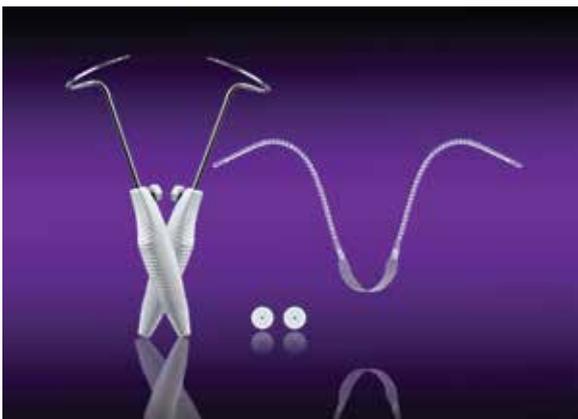


Safyre T Plus Adjustable Sling System incluye:

- 1 Safyre T Plus Adjustable Sling compuesto de una malla de polipropileno monofilamento macroporo como soporte suburetral, conectada a dos brazos de fijación de elastómero de polidimetilsiloxano sólido. Los brazos de fijación del sling están formados por una estructura de múltiples conos.
- 2 agujas semicirculares con mangos de diseño ergonómico. Los mangos facilitan la maniobrabilidad durante los movimientos quirúrgicos giratorios.




PARA EL ABORDAJE TRANSOBTURATORIO

Safyre T Adjustable Sling System es el tratamiento ideal para la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina mediante el abordaje transobturatorio cuando el instrumento elegido es una aguja de curvatura simple.

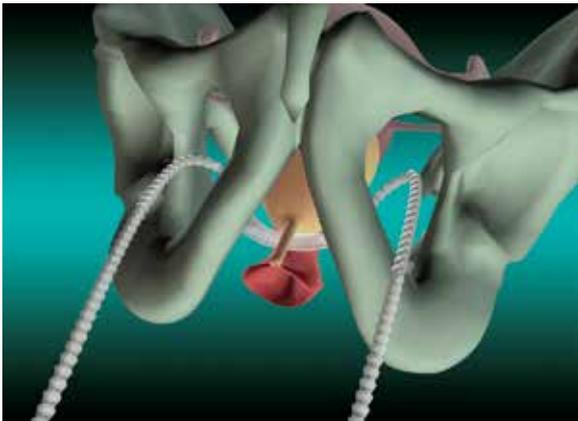


Procedimiento sencillo

- Safyre T Adjustable Sling System permite realizar un procedimiento transobturatorio rápido y sencillo.

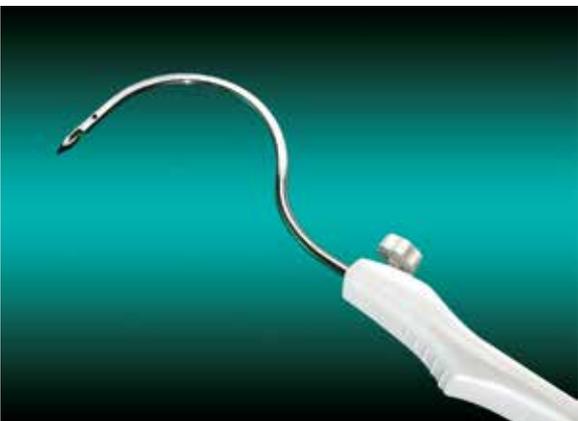

Aguja de diseño ergonómico

- El sistema incluye una aguja de curvatura simple para utilizar tanto en el lado izquierdo como en el derecho mediante el abordaje transobturatorio. La aguja permite una colocación fácil y precisa del sling.

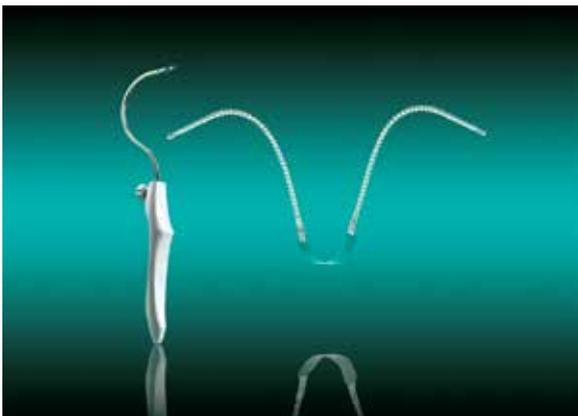


Safyre T Adjustable Sling System incluye:

- 1 Safyre T Adjustable Sling compuesto de una malla de polipropileno monofilamento macroporo como soporte suburetral, conectada a dos brazos de fijación de elastómero de polidimetilsiloxano sólido. Los brazos de fijación del sling están formados por una estructura de múltiples conos.
- 1 aguja de curvatura simple con mango de diseño ergonómico. El diseño del mango facilita la maniobrabilidad durante la inserción.


PARA EL ABORDAJE VAGINAL/SUPRAPÚBICO

Cuando la opción es utilizar un sling retropúbico, la mejor elección es Safyre VS Adjustable Sling System debido a su versatilidad y sus características únicas.

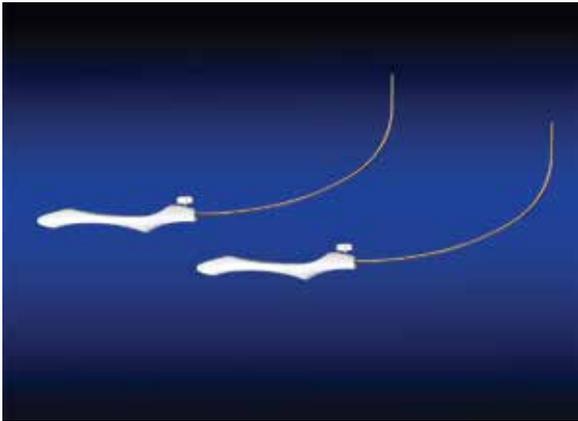

Un sistema, dos opciones

- Debido a su exclusivo diseño de agujas, Safyre VS Adjustable Sling System se puede utilizar tanto para el abordaje vaginal como para el abordaje suprapúbico. El par de agujas de 3,5 mm permite una colocación precisa, segura y mínimamente invasiva del sling.

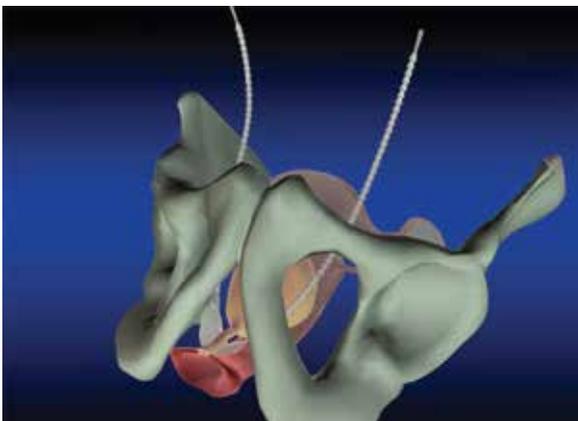

Ajustabilidad

- Safyre VS Adjustable Sling System permite una efectiva coaptación de la uretra debido a la ubicación en forma de "U" del implante y la posibilidad de ajustes postoperatorios, cuando un sling sin tensión no es suficiente.



Safyre VS Adjustable Sling System incluye:

- 1 Safyre VS Adjustable Sling compuesto de una malla de polipropileno monofilamento macroporo como soporte suburetral, conectada a dos brazos de fijación de elastómero de polidimetilsiloxano sólido. Los brazos de fijación del sling están formados por una estructura de múltiples conos.
- 2 agujas curvas con mangos de diseño ergonómico, especialmente desarrollados para maniobras de inserción.

Safyre

Adjustable Sling System

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Safyre T Plus Adjustable Sling System

Código de producto: KIT-TP-01

1 sling Safyre T Plus: S-85-AF

2 agujas T Plus: DPN-HA

2 pares de arandelas: AR-TP

Safyre T Adjustable Sling System

Código de producto: KIT-T-01

1 sling Safyre T: S-52-AF

1 aguja T: DPN-TA

Safyre VS Adjustable Sling System

Código de producto: KIT-VS-01

1 sling Safyre VS: S-42-AF

1 set de agujas VS: DPN-SA

B-30-29(04)/18JAN-2016

Promedon
— People + Innovation

www.promedon.com



CE 0197